

SADA PRO VÝPLACH OČÍ 2 X 500 ML S OČNÍ VANIČKOU

Lahev na vymývání očí slouží k rychlému, efektivnímu a jednoduchému vymývání zasažených očí. Obsahuje sterilní 0,9% fyziologický roztok NaCl, který je svým složením velmi blízký složení oční tekutiny, a je proto pro oči velmi šetrný.

Na rozdíl od vody oči nedráždí, nezpůsobuje pocit jejich pálení a zabraňuje další případné kontaminaci očního prostředí.

Roztok se může použít i při první pomoci k omývání pokožky poraněné chemickými látkami.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Držák se sadou na výplach očí umístěte na zeď na dobře dostupném místě.
2. Řiďte se informacemi k použití, které jsou znázorněny přehlednými grafickými symboly (piktogramy) na lahvi.
3. V případě zasažení očí vyjměte láhev s fyziologickým výplachem očí z držáku.
4. Otočte uzávěrem tak, aby povolila jeho pojistka. Odklopte vrchní kryt lahve. Mírně zakloňte hlavu, lehce stiskněte lahev a **jemným rovnoměrným proudem** vymývejte oko.
5. Jedna lahev 0,9% fyziologického roztoku NaCl o objemu 500ml vystačí na cca 4 minuty intenzivního vyplachování očí. Dle možností doporučujeme provádět výplach očí alespoň 15 min.
6. Oči mohou být vymývány jen sterilním roztokem. Nevypotřebovaný obsah nelze uskladnit pro další použití!

Po provedení první pomoci výplachem očí vyhledejte vždy pomoc očního lékaře!!!

Ve výplachu očí doporučujeme pokračovat i během transportu k lékaři.

BALENÍ:

500 ml (2 ks) – 0,9% roztok NaCl v lahvi s oční vaničkou

Zrcátko

Nástěnný držák

Montážní prvky

Distributor:

AZ-Medica Shop

Komunardů 55, 170 00 Praha 7

e-mail: eshop@azmedica.cz

Tel.: +420 724 884 041